

敷平堤口用液劑

Episil Oral Liquid

衛部醫器輸字第 028807 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書
並遵照指示使用。

1 本產品的效能

本產品可藉由附著於口腔黏膜表面之物理作用，達到傷口覆蓋而緩解疼痛之效果，包括化學治療或放射線治療所導致的口腔黏膜炎。

2 在您使用本產品之前

如果您有下列過敏情形，不要使用本產品：

- 對藥品中任何成份過敏。
- 對花生或大豆過敏。

懷孕與哺乳：本產品在人類懷孕或哺乳的使用上沒有已知疑慮。

開車與機械操作：本產品不影響開車與操作機械的能力。

有關一些本產品成份的重要資訊：本產品包含少量的乙醇（酒精），每個劑量少於100毫克，當使用在疼痛的黏膜表面時，可能會引起燒灼感。本產品包含丙二醇，可能會引起皮膚刺激不適；薄荷油則可能引起過敏反應。

3 如何使用本產品

用法說明：將保護蓋從定量幫浦移除，在使用第一個劑量之前，為預備幫浦機制的運作，先抽吸到紙布上，直到出現均勻的液體噴霧。

劑量：將藥液噴灑一到三次到口中，使藥液分布到口腔患處，等待數分鐘使藥液膠化並形成保護膜。本產品在口腔的使用預期可達到咽部。

給藥頻率：每天使用二到三次或視需要使用。

治療期間：本產品通常連續使用不超過30天。

4 可能的副作用

沒有已知的副作用。

5 如何保存本產品

- 請遠離孩童視線及可及之處。
- 超過有效期限日期以後請勿使用，有效期限在瓶身上標示的縮寫EXP之後。
- 請在第一次使用後的一個月內使用。
- 每一瓶僅供一個人使用。
- 請將藥瓶置放在包裝紙盒內，於室溫下25°C以下保存。

6 進一步資訊

內容物：二油酸甘油酯、大豆磷脂醯膽鹼（卵磷脂）、乙醇、丙二醇、聚山梨醇酯80、薄荷油。

每個包裝紙盒內有一個含有手動定量幫浦的琥珀色玻璃瓶，充填10毫升的口服液劑。

本產品未滅菌。

本產品需經醫師指示使用。

製造廠名稱：

Camurus AB

製造廠地址：

Ideon Science Park, Sölvegatan 41 A, SE-223 70
Lund, Sweden

藥商名稱：

台灣東洋藥品工業股份有限公司

藥商地址：

台北市南港區園區街 3-1 號 3 樓

620210

CA20028-00